



## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- Не допускать смешивания с полисульфидным оттискным материалом или эвгенолом.
- Предназначено исключительно для использования специалистами в сфере стоматологии
- Не допускайте попадания в глаза или на кожу.
- Рекомендуется хорошо мыть руки или использовать виниловые перчатки. Не допускайте контакта с латексными перчатками, маслами, акрилатами и глицерином.
- Хранить в недоступном для детей месте.



### Упаковка

- 4 картриджа по 50 мл (25 мл основы, 25 мл катализатора)
- Упаковка – картонная коробка - 1 шт.
- Инструкция по применению - 1шт.



### Срок годности

- 2 года с даты изготовления



### Место хранения

- Беречь от прямых солнечных лучей.
- Хранить в сухом и прохладном месте.



# DENU Bite Sil

МАТЕРИАЛ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПРИКУСА



Denu **Bite Sil** – это гидрофильный материал для регистрации прикуса на основе А-силикона, обладающий превосходными свойствами и твердостью по Шору, равной А-91, легкотекучий, позволяющий создать точный оттиск для безошибочной регистрации прикуса.

## Показания

- Снятие оттиска для регистрации прикуса.



## Характеристики и преимущества

- Винилполисилоксановый материал (VPS) регистрация прикуса
- Простота в обращении и нанесении
- Невероятная точность
- Высокая твердость без искажений
- Быстрое время приготовления и отверждения



## Рабочее время и время установки

- Время работы/приготовления: 20 секунд
- Время установки и отверждения: 30 секунд

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ  
Ортопедическая стоматология

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- **Установите картридж в диспенсер для оттисков.**

\* Картриджи универсальны: подходят для любого типа диспенсера.

- **Выдавливая небольшое количество материала, добейтесь должной консистенции базовой пасты и пасты-катализатора.**

- **Наденьте на картридж насадку для смешивания и поверните ее на 90 градусов по часовой стрелке.**

- **Аккуратно потяните за ручку диспенсера оттискных материалов для того, чтобы добиться надлежащего смешивания материалов.**

\* Следует использовать наконечник синего цвета, как для оттискных паст высокой плотности.

# DENU Bite Sil

МАТЕРИАЛ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПРИКУСА

