




## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- Не допускать смешивания с полисульфидным оттискным материалом или эвгенолом
- Предназначено исключительно для использования специалистами в сфере стоматологии
- Не допускать попадания в глаза или на кожу
- Рекомендуется хорошо мыть руки или использовать виниловые перчатки
- Не допускать контакта с латексными перчатками, маслами, акрилатами и глицерином
- Хранить в недоступном для детей месте.

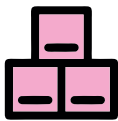

### Упаковка

- 4 картриджа по 50 мл (25 мл основы, 25 мл катализатора)
- Насадка для смешивания. Цвет зеленый - 3 шт.
- Инструкция по применению - 1шт.



### Срок годности

- 2 года с даты изготовления



### Место хранения

- Беречь от прямых солнечных лучей.
- Хранить в сухом и прохладном месте (15-30 °C, 34-86 °F).



# DENU Medium Body

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЛЕПОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

ДЛЯ СНЯТИЯ ОТТИСКОВ С УРОВНЯ ЗУБОВ И ИМПЛАНТАТОВ



Denu **Medium Body** – Поливинилсилоксановый А-силиконовый слепочный корригирующий материал средней вязкости с различным временем отверждения. Гидрофильный. Изделия двухкомпонентные - база и катализатор.

### Показания

- Снятие слепков с зубных рядов, имплантатов;
- Снятие оттисков с искусственных коронок, виниров, коронок на имплантатах;
- Снятие оттисков с вкладок и накладок;
- Снятие оттисков при съемном протезировании;
- Снятие оттисков при несъемном протезировании.



### Характеристики и преимущества

- превосходная точность и стабильность оттиска
- минимальная деформация слепка при извлечении из полости рта
- эластичность
- высокая прочность на разрыв и упругость
- высокая степень гидрофильности
- простота использования



### Рабочее время и время установки

- **Regular (Normal) Type:**  
Время работы/приготовления: 2 минуты  
Время установки и отверждения: 4 минуты
- **Fast Type:**  
Время работы/приготовления: 1,3 минуты  
Время установки и отверждения: 2,3 минуты

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ  
**Ортопедическая стоматология**

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Подготовка

- Проверьте изделие и срок его годности перед применением.
- Внимательно прочтите указания по применению.
- Удалите крышку картриджа, повернув ее на 1/4 оборота против часовой стрелки.
- Установите на картридж наконечник для смешивания и разместите картридж в соответствующем держателе на диспенсере картриджей.

### Указания по применению

- При необходимости равномерно нанесите адгезив на оттискную ложку с помощью щетки или тампона.
- Разместите в оттискной ложке необходимый материал **Medium Body**
- Установите ложку с материалом в рот на указанное для консистенции время действия и дождитесь схватывания.
- После схватывания материала удалите оттиск.
- Полученный оттиск следует очистить и дезинфицировать с помощью соответствующего дезинфицирующего средства.
- При необходимости незамедлительно залейте модель в удаленный оттиск.
- После схватывания модели аккуратно отделите ее от оттиска

## DENU Medium Body

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЛЕПОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СНЯТИЯ  
ОТТИСКОВ С УРОВНЯ ЗУБОВ И ИМПЛАНТАТОВ

