



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- Не допускать смешивания с полисульфидным оттискным материалом или эвгенолом
- Предназначено исключительно для использования специалистами в сфере стоматологии
- Не допускать попадания в глаза или на кожу
- Рекомендуется хорошо мыть руки или использовать виниловые перчатки
- Не допускать контакта с латексными перчатками, маслами, акрилатами и глицерином
- Хранить в недоступном для детей месте.



Упаковка

- 1 x 250 г (280 мл) базовой пасты
- 1 x 250 г (280 мл) пасты-катализатора
- Мерная ложка - 2 шт.
- Инструкция по применению - 1 шт.



Срок годности

- 2 года с даты изготовления



Место хранения

- Беречь от прямых солнечных лучей.
- После использования плотно закрыть крышку.
- Хранить в сухом и прохладном месте (15-30 °C, 34-86 °F).



DENU Putty Set

ПОЛИВИНИЛСИЛОКСАНОВЫЙ ОТТИСКНЫЙ МАТЕРИАЛ



Denu **Putty Set** – Поливинилсилоксановый А-силиконовый слепочный базовый материал высокой вязкости с различным временем отверждения. Гидрофильный. Изделия двухкомпонентные – база и катализатор.

Показания

- Снятие слепков с зубных рядов, имплантатов;
- Снятие оттисков с искусственных коронок, виниров, коронок на имплантатах;
- Снятие оттисков с вкладок и накладок;
- Снятие оттисков при съемном протезировании;
- Снятие оттисков при несъемном протезировании;
- Снятие оттисков для изготовления рабочих и диагностических моделей



Характеристики и преимущества

- превосходная точность и стабильность оттиска
- минимальная деформация слепка при извлечении из полости рта
- эластичность
- высокая прочность на разрыв и упругость
- высокая степень гидрофильности
- простота использования



Рабочее время и время установки

- **Regular (Normal) Type:**
Время работы/приготовления: 2 минуты
Время установки и отверждения: 4 минуты
- **Fast Type:**
Время работы/приготовления: 1,3 минуты
Время установки и отверждения: 2,3 минуты

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Ортопедическая стоматология

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка

- Проверьте изделие и срок его годности перед применением.
- Внимательно прочтите указания по применению.
- Откройте крышку и подготовьте поставляющиеся в комплекте мерные ложки.

Указания по применению

- При необходимости равномерно нанесите адгезив на оттискную ложку с помощью щетки или тампона.
- Разместите в оттискной ложке необходимый материал Putty Set.
- Установите ложку с материалом в рот на указанное для консистенции время действия и дождитесь схватывания.
- После схватывания материала удалите оттиск.
- Полученный оттиск следует очистить и дезинфицировать с помощью соответствующего дезинфицирующего средства.
- При необходимости незамедлительно залейте модель в удаленный оттиск.
- После схватывания модели аккуратно отделите ее от оттиска

DENU Putty Set

ПОЛИВИНИЛСИЛОКСАНОВЫЙ ОТТИСКНЫЙ МАТЕРИАЛ

